

## **EVO GLUTAR**

### ***Dispositivo Medico disinfettante di classe IIB***

**Proprietà:** EVO GLUTAR è un disinfettante pronto all'uso a base di glutaraldeide acida per la disinfezione di dispositivi medici riutilizzabili. Presenta uno spettro d'azione completo verso: batteri, miceti, virus, spore e micobatteri, la sua reazione acida consente la stabilità del principio attivo nella forma libera. Compatibile con i materiali lavabili e facilmente sciacquabile, non corrode i metalli e non deteriora la gomma. Idoneo per impiego manuale o con ultrasuoni.

**Campi di impiego:** Per la disinfezione a freddo di dispositivi medici quali ferri chirurgici (inclusi quelli di impiego odontoiatrico), strumenti a fibre ottiche, tubi respiratori, apparecchi di anestesia, dispositivi medici riutilizzabili termosensibili.

#### ***Caratteristiche chimico-fisiche***

Aspetto	liquido
pH	acido
densità a 20° C	1,070
solubilità	completa in acqua

**Composizione:** 100 grammi di prodotto contengono: 2 grammi di Glutaraldeide, eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100 g.

#### ***Modalità d'impiego:***

**EVO GLUTAR** è pronto all'uso.

Si raccomanda di immergere completamente gli strumenti da disinfettare nella soluzione dopo averli accuratamente lavati ed asciugati. Conservare la soluzione in vasca coperta. Tempi di contatto:

**disinfezione in immersione** minimo 10 minuti.

Processi di **sterilizzazione chimica a freddo per immersione** tempi di contatto oltre le 3 ore fino a 10 ore. Una volta completato il trattamento, rimuovere i dispositivi asetticamente, risciacquarli abbondantemente ed ed asciugarli.

In ogni caso leggere il manuale d'uso del dispositivo medico soggetto al trattamento nella parte pertinente alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione. Non immergere oggetti in acciaio al carbonio per oltre 24 ore.

#### ***Modalità di conservazione***

Conservare i contenitori chiusi, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Una volta aperta, la confezione di **EVO GLUTAR** può rimanere attiva per 12 settimane purché conservata chiusa ed al riparo da fonti di calore.

Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. D.M. rientrante nella classe IIB ai fini della direttiva 93/42/CEE e succ. mod.e integr.

**Avvertenze:** Nocivo per inalazione e ingestione. Il preparato è irritante per la pelle e le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico. Non utilizzare direttamente sul paziente. Non utilizzare con dispositivi monouso. Non disperdere nell'ambiente.

Prodotto ad uso professionale: utilizzato da personale specializzato con appropriati dispositivi di protezione.

**Confezioni: Flaconi da 1 Lt**



**EVOKSAN srl**

Via:modigliani,10 40014 Crevalcore (BO) Tel. 800846209 P.Iva 03671821209 [info@evoksan.com](mailto:info@evoksan.com)